

EL

ESTHETIC LINE
implant



C-TECH
IMPLANT

TAVOLA DEI CONTENUTI

EL-IMPIANTO ESTHETIC LINE

Caratteristiche Dell'impianto	pag. 04
Impianto dentale	pag. 05
Transfer d'impronta per cucchiaio chiuso	pag. 06
Transfer d'impronta per cucchiaio aperto	pag. 07
Abutment di pianificazione	pag. 08
Monconi in titanio	pag. 09
Monconi provvisori (peek)	pag. 10
Protesi avvitare	pag. 11
Tecnica con portaimpronte chiuso	pag. 12
Tecnica per protesi avvitare	pag. 13
Sistema a barre	pag. 14
Sistema di ancoraggio su pilastro	pag. 15
Sistema di ancoraggio equator	pag. 16
Kit chirurgico deluxe	pag. 17
Componenti del kit chirurgico	pag. 18
Frese e maschiatori	pag. 19



Tutti i materiali prodotti da C-TECH seguono una procedura validata, che include il trattamento superficiale e l'imballaggio, in conformità con le direttive europee e internazionali EN ISO 13485:2003 / AC: 207 e 93/42/CEE relative ai dispositivi medici.



SOLUZIONI DI PRECISIONE DENTALE

C-Tech Implant è una società dinamica con una forte crescita, che produce componenti e linee di prodotti principalmente per l'implantologia dentale.

PRESENZA INTERNAZIONALE

La produzione e gestione si trovano in Italia, C-Tech Implant è però attiva in tutti i mercati mondiali ed è distribuita in oltre 20 paesi.

RICERCA SCIENTIFICA, TECNOLOGIA AVANZATA E SEMPLIFICAZIONE

C-Tech Implant si differenzia ponendo grande attenzione alla ricerca e l'applicazione delle ultime tecnologie ai suoi prodotti, il tutto mantenendo una semplicità di inserimento e la facilità d'uso.

C-Tech Implant interpreta le più recenti tendenze implantologiche modificandole per farle divenire soluzioni chirurgiche e protesiche pratiche finalizzate ad offrire al professionista e al paziente un risultato ottimale.

STANDARD DI QUALITÀ ELEVATA A PORTATA DI MANO

Gli impianti C-Tech sono realizzati secondo i più alti standard in materia di produzione e gestione dei programmi europei di componenti mediche e odontoiatriche.

Verifiche e certificazioni continue assicurano che tali standard siano mantenuti.

FORMAZIONE E CONSIGLI

Professionisti del settore dentale sono assistiti dalle conoscenze e dall'esperienza del personale C-Tech e organizza corsi e sessioni di formazione.

Durante questi corsi il professionista è in grado di apprendere i più recenti metodi di inserzione degli impianti e di riabilitazione.

OBIETTIVI

L'obiettivo di C-Tech Implant è di fornire il massimo livello di qualità, prodotti tecnologicamente avanzati a prezzi ragionevoli in modo da permettere al dentista di trovare soluzioni per la più ampia gamma di pazienti.



ESTHETIC LINE implant

SPALLA

- Facilita la crescita dell'osso al di sopra della spalla.
- Maggiore stabilità a lungo termine dell'implanto.
- Ripartizione biologica delle forze sulla corticale ossea.

MICROFILETTO

- Riduce la forza sulla corticale durante l'inserimento.
- Preserva la corticale ossea.

SUPERFICE SABBIA ACIDIFICATA-DECONTAMINATA

- La migliore superficie per l'osseo-integrazione e per l'area di contatto osso-implanto (BIC).

DISEGNO AGGRESSIVO DELL'APICE

- Ideale per post-estrattivi.
- Ottima stabilità primaria.

APICE ARROTONDATO

- Protegge la membrana sinusale, il nervo canalare ed altre importanti strutture anatomiche durante l'inserzione.

LIVELLO OSSEO IMPIANTO SOTTO CRESTALE

- Ostacola il riassorbimento osseo e quindi l'esposizione dell'implanto.
- Particolarmente indicato per zone estetiche.
- Stabilità estetica a lungo termine.

TRE DIFFERENTI PROFILI DI FILETTATURA

- Disegno della filettatura indicato per le differenti tipologie di osso che si succedono nell'inserzione dell'implanto.
- Maggiore superficie di contatto.
- Apice arrotondato ma tagliente.

PASSO A DOPPIA FILETTATURA

- Avanzamento di 1,5mm per giro d'inserzione.
- Aumenta la stabilità primaria.
- Aumenta la superficie di contatto osso-implanto (BIC).
- Veloce e delicato nell'inserimento a protezione della struttura ossea.

SCANALATURA NELLA SCANALATURA

- Aumenta la superficie di contatto osso-implanto (BIC).

CONCETTO ESTETICO CONCAVO (CEC)

- Tessuti perimplantari non ispessiti chirurgicamente.
- Tecnica di ricostruzione della papilla facilitata.

PLATFORM SWITCHING

- Riduce la perdita ossea.
- Migliora la rappresentazione dell'ampiezza biologica.
- Stabilità estetica a lungo termine.

UNICA CONNESSIONE PER TUTTI E 3 I DIAMETRI

- Semplifica il sistema implantare.
- Riduce il magazzino.
- Semplice da usare.

TENUTA A FUSIONE FREDDA


- Ostacola l'infiltrazione batterica e la conseguente perdita ossea.

CONNESSIONE CONICA CONE-MORSE

- Elimina i micro movimenti.
- Elimina lo svitamento della vite passante.

INDICE DI POSIZIONE ESAGONALE


- Garanzia di antirotazionalità.

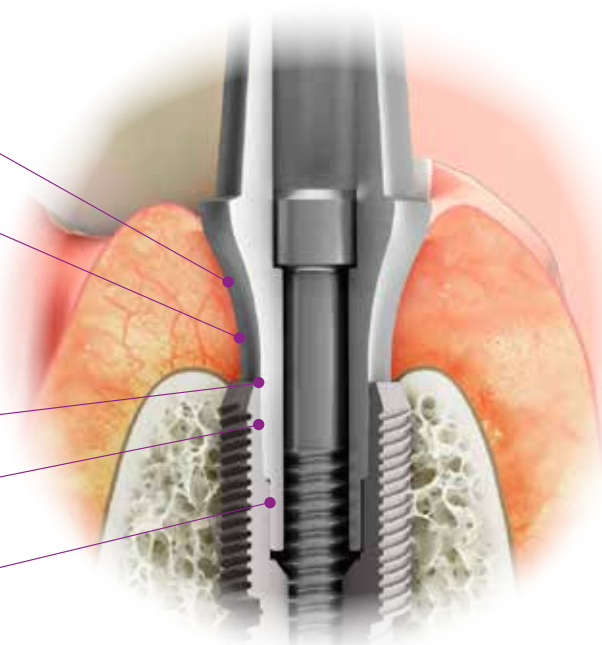

IMPIANTO DENTALE



9 mm	EL-3509	EL-4309	EL-5109
11 mm	EL-3511	EL-4311	EL-5111
13 mm	EL-3513	EL-4313	EL-5113
15 mm	EL-3515	EL-4315	EL-5115

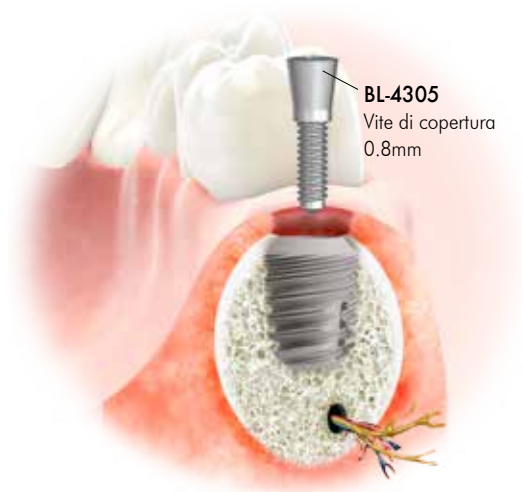

IMPIANTO CORTO EL



7 mm	EL-4307	EL-5107
------	---------	---------

VITI DI GUARIGIONE IN PEEK Ø 4

INCLUDE LE VITI



EL-4502H



EL-4503H



EL-4504H*



EL-4506H*

VITI DI GUARIGIONE IN PEEK Ø 5

INCLUDE LE VITI



EL-5502H



EL-5503H



EL-5504H*



EL-5506H*



*Utilizza la vite lunga EL-5052HXL

TRANSFER D'IMPRONTA PER CUCCHIAIO CHIUSO



BL-4543
Cappetta per impronte



EL-4502P EL-5502P
EL-4503P EL-5503P
EL-4504P EL-5504P
EL-4506P EL-5506P

Il moncone provvisorio in peek, utilizzato insieme alla cappetta BL-4543 può fungere da transfer d'impronta.

BL-4540

Transfer d'impronta per Portaimpronte chiuso. Include la cappetta da impronta (BL-4543) e la rispettiva vite.

BL-4540L

Transfer da impronta per Portaimpronte chiuso lungo. Include la cappetta da impronta (BL-4543) e la rispettiva vite.

BL-5143

Analogo

BL-5052HX

Vite

EL-5052HXL

Vite lunga

DESTINAZIONE D'USO

Tecnica del portaimpronte chiuso.

CARATTERISTICHE

- Semplice;
- Profilo d'emergenza assottigliato per spazi ridotti;
- Nessuna preparazione supplementare (es. perforazione) del portaimpronte;
- Componenti di alta precisione per dare una replica esatta della situazione intraorale;
- Il corretto posizionamento dei componenti è semplicemente verificabile al tatto.

NOTA

La cappetta BL-4543 garantisce ingaggio e precisione ottimali per un solo utilizzo.



FASE 1

Posizionare il post del portaimpronte con precisione nell'impianto e stringere a mano la vite di guida.

FASE 2

Spingere la cappetta da impronta nella parte alta del transfer.

FASE 3

Prendere l'impronta con un elastomero (polivinilsilossano o polietere).

FASE 4

Utilizzare un portaimpronte standard.

FASE 5

Montare il transfer sull'analogo usando la vite (ref. BL-5052HX).

FASE 6

Riposizionare il transfer nel portaimpronte. Spingere il transfer fino a sentirne il saldo e completo posizionamento sulla cappetta da impronta.

TRANSFER D'IMPRONTA PER CUCCHIAI APERTI

DESTINAZIONE D'USO

Tecnica per portaimpronte aperti.

CARATTERISTICHE

- Semplice;
- Profilo d'emergenza assottigliato per spazi ridotti;
- La vite guida deve essere serrata a mano;
- Componenti di alta precisione per dare una replica esatta della situazione intraorale;
- Il corretto posizionamento dei componenti è semplicemente verificabile al tatto.

NOTA

La procedura del portaimpronte aperto richiede un cucchiaino personalizzato con fori. I post per impronta sono destinati ad essere utilizzati una sola volta per garantire uno standard ottimale e preciso dell'impronta.



EL-4544

Post per portaimpronte aperti. Include la vite BL-5050L.



BL-4542

Post per portaimpronte aperti. Include la vite BL-5050L.



BL-5143

Analogo



BL-5050L

Vite lunga per transfer da impronta per cucchiaini aperti.



BL-5050S

Vite corta per transfer da impronta per cucchiaini aperti.



FASE 1

Posizionare il post del portaimpronte con precisione nell'impianto e stringere a mano la vite di guida.

FASE 2

Perforare il portaimpronta personalizzato in base alla situazione individuale di modo che la vite sporga.

FASE 3

Prendere l'impronta con un elastomero da impronta (polivinilsilossano o polietere).


FASE 4

Riposizionare e fissare gli analoghi nell'impronta usando una vite.

MONCONI PER PIANIFICAZIONE PROTESICA

ABUTMENT DA PROGETTO Ø5

INCLUDE LE VITI

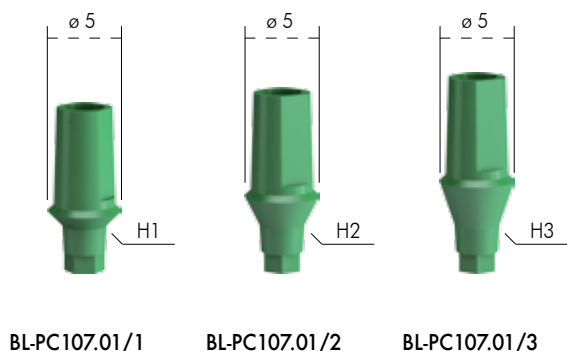

BL-PC107.01/1

BL-PC107.01/2

BL-PC107.01/3

DESTINAZIONE D'USO

Pianificazione intra e extra-orale di restauro protesico.

CARATTERISTICHE


- Semplice utilizzo anche grazie al supporto in plastica;
- Monconi con codifica colore, marcati e facilmente interpretabili;
- Monconi di pianificazione ben disposti all'interno di un set completo;
- Facilità e precisione di posizionamento grazie all'indice ad esagono;
- Realizzati in materiale sterilizzabile.

NOTA

Assicurarsi che i monconi siano sterilizzati dopo ogni uso intra-orale. La scatola del kit non è sterilizzabile.

ABUTMENT DA PROGETTO ANGOLATO 15°

INCLUDE LE VITI

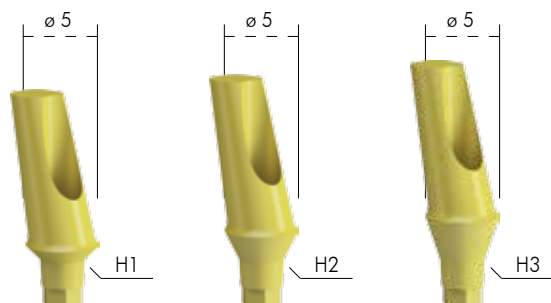

BL-PC107.02/1

BL-PC107.02/2

BL-PC107.02/3

FASE 1

Posizionare l'abutment da PROGETTAZIONE nel modello al fine di pianificare e scegliere il pilastro in Titanio adeguato in maniera efficace.

FASE 2

Posizionare l'abutment in Titanio e stringere la vite a mano.

FASE 3

Preparare il moncone in Titanio, e modificarlo come richiesto.

FASE 4

Realizzare la sovrastruttura sul moncone modificato utilizzando le tecniche standard di modellazione, fusione e mascheratura.

FASE 5


fondere la struttura utilizzando i metodi di fusione standard.

FASE 6

Realizzare la sovrastruttura.

ABUTMENT DA PROGETTO ANGOLATO 25°


INCLUDE LE VITI

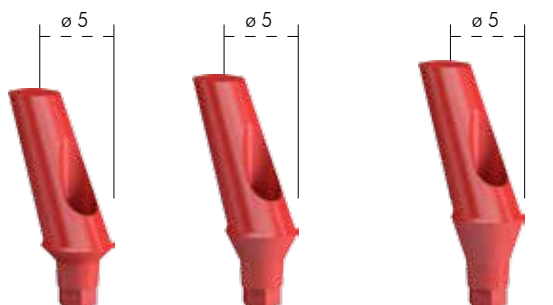

BL-PC107.03/1

BL-PC107.03/2


BL-PC107.03/3

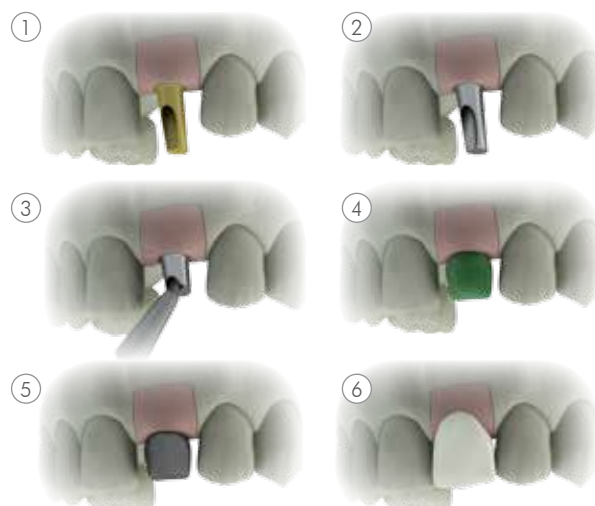

ABUTMENT IN TITANIO

ABUTMENT CEC IN TITANIO Ø 4

INCLUDE LE VITI

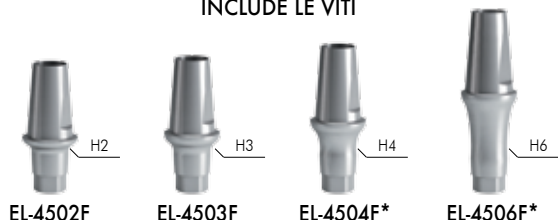


ABUTMENT CEC IN TITANIO Ø 5

INCLUDE LE VITI



ABUTMENT CEC ANGOLATO 18°

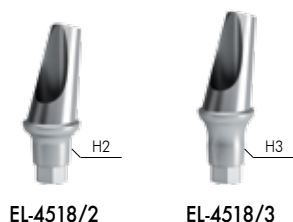

SCAN ABUTMENT



BASE PER ZIRCONIA



BL-6046
base in titanio per zirconia o
calcinabile

BASE IN TITANIO + CALCINABILE



BL-6045
Base in titanio
+ calcinabile UCLA

VITI PROTESICHE INTERNE



BL-5052HX
Standard
vite protesica



Z-5052
Protesica vite
per i pilastri in zirconio



EL-5052HXL
Lunga vite protesica
per H4 - H6

DESTINAZIONE D'USO

Protesi cementate.

SERRAGGIO:

Con cricchetto dinamometrico 30 N = Ncm


CARATTERISTICHE

- Semplice utilizzo;
- Meno rettifiche necessarie grazie ai margini della mucosa già preparati;
- Diverse altezze dei margini della mucosa (h. 1, 2 e 3 mm) permettono una maggiore adattabilità ai tessuti molli
- Profilo di emergenza ovale che ricorda la forma del dente naturale;
- Connessione conica (cono-morse): moncone ed impianto sono collegati in modo da formare un unico pezzo;
- Il sistema ad estrattore permette una facile e atraumatica rimozione del moncone dall'impianto o dall'analogo.



NOTA

Il margine di cemento non deve essere superiore a 2 mm al di sotto della mucosa. Utilizzare una nuova vite basale per l'inserimento finale del moncone.

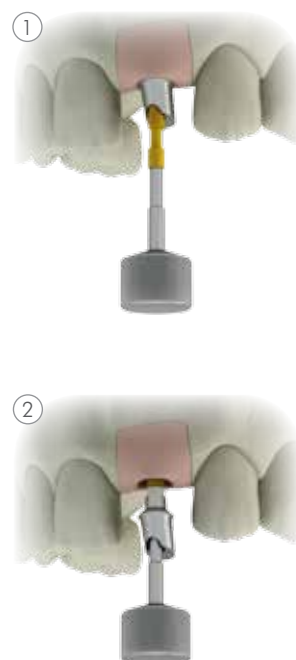

VITE ESTRATTRICE DI ABUTMENT



Quando l'estrattore viene inserito spinge il moncone fuori dall'impianto e dall'analogo.

BL-6060



*Utilizza la vite lunga EL-5052HXL

ABUTMENT PROVVISORI IN PEEK

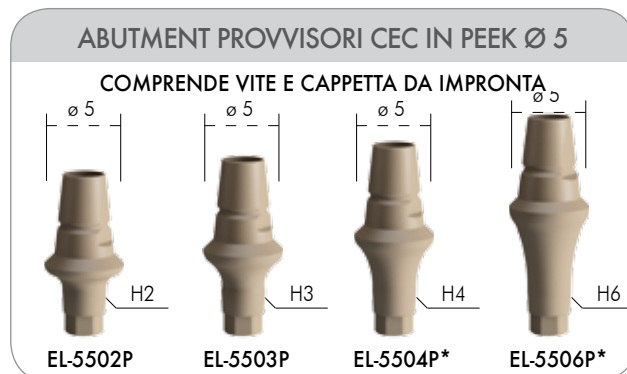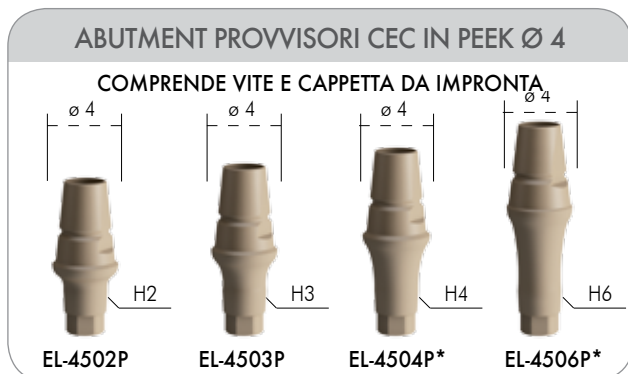

*Uses the long screw EL-5052HXL

NOTA

il moncone provvisorio in peek , utilizzato insieme alla cappetta BL-4543 può fungere da transfer d'impronta.



BL-4543
Cappetta da impronta



Solo per I ref. EL-4506P e EL-5506P utilizzare la cappetta di impronta EL-4546



NOTA

Il moncone temporaneo peek può essere utilizzato insieme alla cappetta EL-4543 per stabilizzare temporaneamente la protesi.





EL-4543
Cappetta temporanea in peek.



MONCONI IN ZIRCONIA

Tutti i monconi in zirconia includono la vite passante.

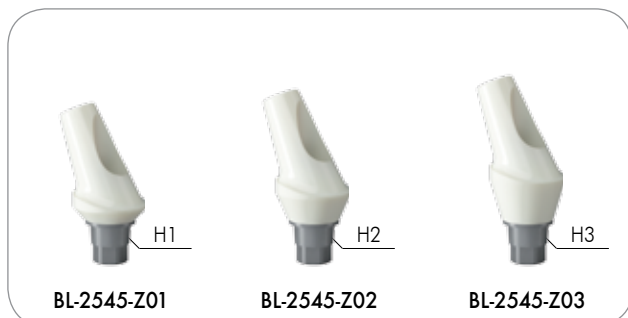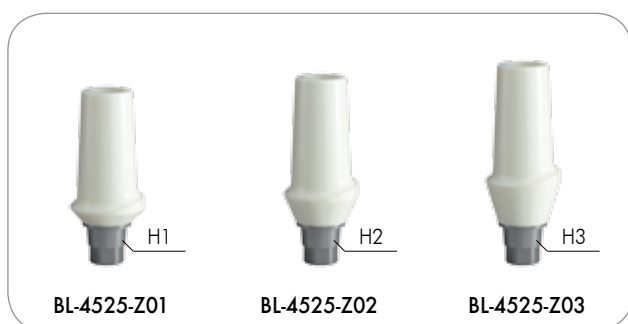


N.B.: Il codice della vite protesica dei monconi in zircone è Z-5052

PROTESI AVVITATE



ABUTMENT DIRITTO

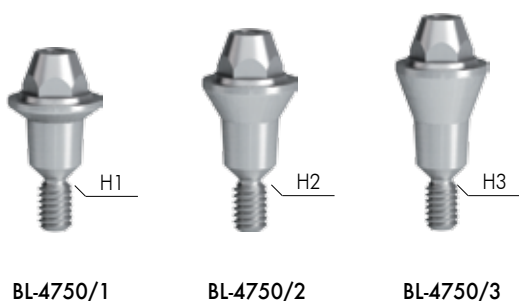

ABUTMENT PREANGOLATO 17°



ABUTMENT PREANGOLATO 30°




IL SET COMPLETO INCLUDE:



1. Abutment multi-unit preangolato
2. Vite protesica



TECNICA CON PORTAIMPRONTE CHIUSO

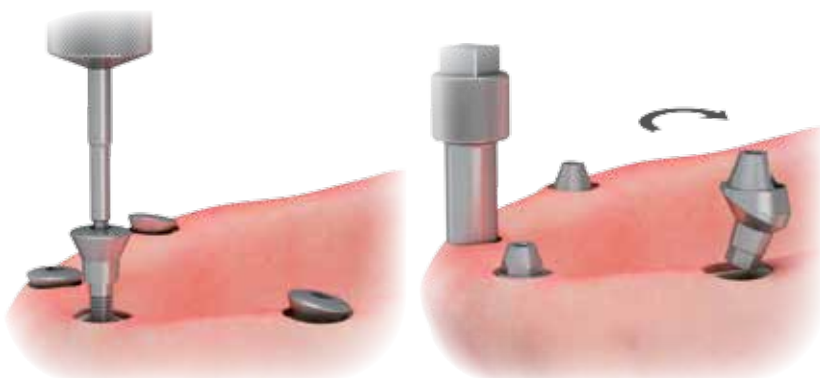

FASE 1
Rimuovere le viti di chiusura.



FASE 2
Avvitare il moncone diritto nell'impianto utilizzando la chiave di serraggio BL-0600.

PROCEDURA ORALE

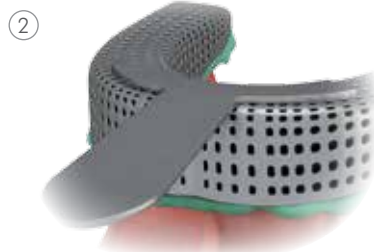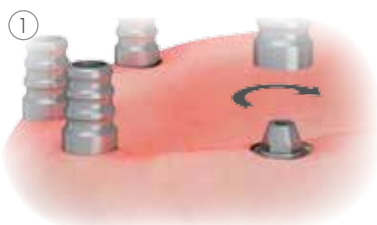

FASE 1
Avvitare un transfer per portaimpronte chiuso su ciascun moncone.



FASE 2
Prendere l'impronta con un elastomero da impronta (silossano polivinile o gomma polietere).

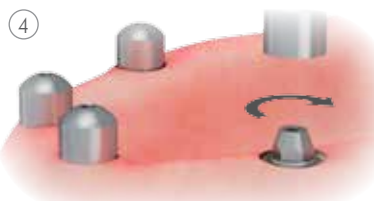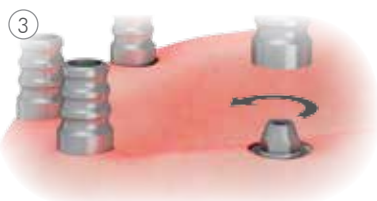

FASE 3
Rimuovere il transfer per portaimpronte chiuso dal pilastro.

FASE 4
Avvitare le cappette di guarigione in modo da mantenere i tessuti molli fino a quando la protesi definitiva non sarà completata.

PROCEDURE DI LABORATORIO

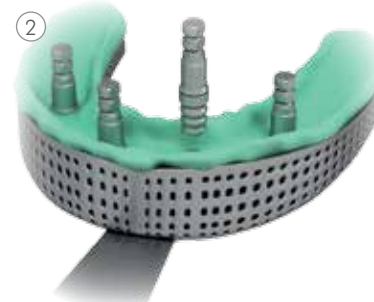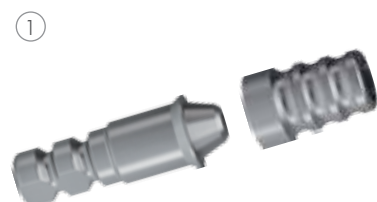

FASE 1
Avvitare il transfer per portaimpronte chiuso sull'analogo.

FASE 2
Riposizionare il transfer sull'impronta precedentemente presa accertandosi che i transfer siano inseriti correttamente.




FASE 3
Modello master.

PROTESI AVVITATE

①



②

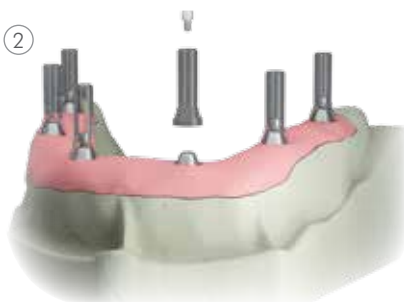

FASE 1
Modello Master.

FASE 2
Posizionare e avvitare i monconi calcinabili sugli analoghi multi-unità sporgenti.

FASE 3
Finta gengiva rimovibile per facilitare l'accesso sottomucoso e la verifica del posizionamento dei componenti.

FASE 4
Fissare il moncone calcinabile con la vite per ponti. Eseguire la ceratura del ponte di dimensioni appropriate.

FASE 5
Preparare la modellazione per le procedure di fusione.

FASE 6
Provare e verificare la struttura sul modello di lavoro, che deve essere passivo.

③



④



⑤




⑥



SISTEMA A BARRE



BL-5146
Analogo multi-unità

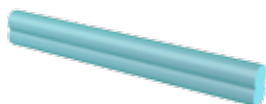

0220BB
OT-Bar (2 pezzi)



027CRR
clip rosa soft (4 pezzi)




027CRG
clip gialla medium
(4 pezzi)



BL-5647
Abutment calcinabile.
Viti incluse




BL-6051
Viti del ponte

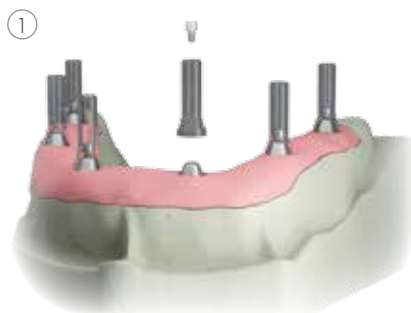

FASE 1
Posizionare il moncone calcinabile
sugli analoghi e stringere le viti
interne.

FASE 2
Adattare il calcinabile in altezza in
base alla situazione individuale.

FASE 3
Utilizzare una resina calcinabile
per fissare i segmenti di barra agli
abutment calcinabili.

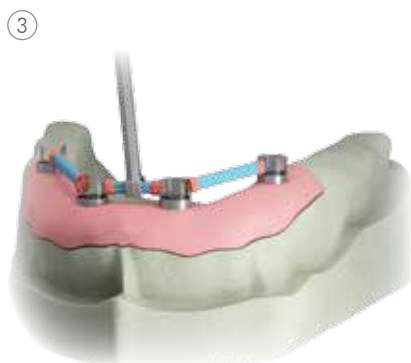


FASE 4
Inserire le Clip, che andranno
inglobate nella protesi.

SISTEMA CON ATTACCO A SFERA


Chiave di serraggio



BL-0600

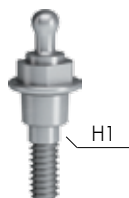

BL-5641
set completo

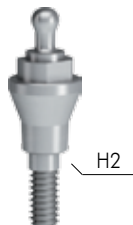


BL-5642
set completo



BL-5643
set completo



BL-5144
analogo o-ball

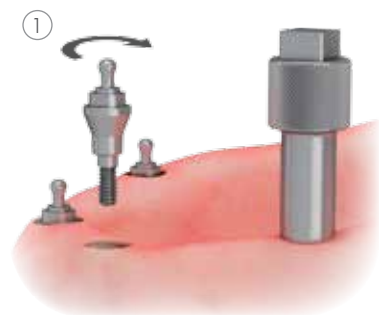

DESTINAZIONE D'USO

Protesi rimovibili ritenute da impianti intramandibolari e intramascellari.

CARATTERISTICHE

- Semplice;
- Il processo clinico per l'attacco a sfera è semplice e veloce;
- Funzionale;
- L'attacco O-ring è stato progettato per eliminare virtualmente l'usura del moncone sferico e minimizzare la necessità di manutenzione;
- 3 diverse altezze gengivali;
- 3 differenti resistenze O-ring che offrono ritenzione ottimale per ogni singola situazione.

AFFIDABILE

Ritenzione ottimale della protesi. Eccellenti prestazioni a lungo termine dovute alla minima usura degli O-ring.

FASE 1 - Avvitare il moncone sferico all'impianto utilizzando il cricchetto dinamometrico (30 Ncm) e la chiave di serraggio BL-0600.

FASE 2 - Ribasare l'overdenture secondo la procedura standard.

FASE 3 - Utilizzare una fresa da laboratorio per ritoccare la base della protesi nelle aree indicate.

CONTENITORE IN METALLO



MCH-1
Ritenzione soft



MCH-2
Ritenzione media



MCH-3
Ritenzione forte



MC-3005B
O-ring (5 pezzi)



MC-3005
O-ring (5 pezzi)

IL SET COMPLETO CONTIENE:



1. O-Ring (Rif. MC-3005) 1 pezzo
2. contenitore in metallo (Rif. MCH-2)
3. Abutment O-Ball (Rif. 5644, 5642, 5641)

SISTEMA DI ANCORAGGIO SU PILASTRO

CAPPETTE CON CONTENITORE IN METALLO



141CAE

2 contenitori in acciaio inox



140CEV

4 cappette viola ritenzione "forte" (2,7 kg)



140CET

4 cappette bianche ritenzione "standard" (1,8 kg)



140CER

4 cappette rosa ritenzione "soft" (1,2 kg)



140CEG:

4 cappette gialle ritenzione "extra-soft" (0,6 kg)

SISTEMA DI ANCORAGGIO AD ABUTMENT SET COMPLETO



130BL1



130BL2



130BL3



130BL4



130BL5

IL SET COMPLETO CONTIENE:



1 moncone ad ancoraggio (Rif. 130BL1, 130BL2, 130BL3, 130BL4, 130BL5)
1 contenitore in acciaio inox (Rif. 141CAE)
1 cappetta viola - ritenzione "forte" (Rif. 140CEV)
1 cappetta bianca - ritenzione "standard" (Rif. 140CET)
1 cappetta rosa - ritenzione "soft" (Rif. 140CER)
1 cappetta gialla - ritenzione "extra-soft" (Rif. 140CEG)

ACCESSORI DA LABORATORIO



140CEN

4 cappette da laboratorio nere



144MTE

2 transfer da impronta



144AE

2 analoghi da laboratorio



044CAIN

Transfer da impronta a strappo

STRUMENTI CHIRURGICI



124ICP

1 manico "Multiuso" in plastica blu

185IAC

1 inseritore di cappette in metallo



191ECS

1 estrattore di cappette in metallo



774CQ

1 chiave quadrata per abutment OT-Equator (quadrato 1,25 mm)



760CE

chiave quadrata per contrangolo

KIT CHIRURGICO DELUXE

IL KIT CHIRURGICO DELUXE CONTIENE:

Fresa lanceolata CT-2020
Fresa irrigazione esterna 2.0 (Ø 2.0) CT-1720E
Fresa irrigazione esterna 3.5 (Ø 3.0) CT-1735E
Fresa irrigazione esterna 4.3 (Ø 3.6) CT-1743E
Fresa irrigazione esterna 5.1 (Ø 4.6) CT-1751E
Preparatore di spalla CT-2035E
Maschiatore 3.5 CT-7154E
Maschiatore 4.3 CT-7155E
Maschiatore 5.1 CT-7151E
Allungatore chirurgico CT-2000
Chiave manuale esagonale corta CT-9025S
Chiave per vite protesica 1.25 mm corta CT-8051
Chiave per vite protesica 1.25 mm lunga CT-8052
Chiave inserimento impianto a contrangolo CT-E9040
Chiave inserimento impianti a cricchetto CT-E7001

Chiave inserimento impianti a cricchetto lunga CT-E7001L
Cricchetto dinamometrico (50 Ncm) CT-8010
Profondimetro (3.5 mm) CT-E9007
Profondimetro (4.3 mm) CT-E9008
Profondimetro (5.1 mm) CT-E9010
Pin di parallelismo, quantità 2 (1.6 mm e 2.0 mm) CT-9000
Set stop in metallo (1.9/11/13/15) CT-STOP07/08/09/10
Chiave inserimento impianto bl a contrangolo BL-E9040
Chiave inserimento impianto bl a cricchetto BL-E7001
Chiave inserimento impianto bl a cricchetto lunga BL-E7001L
Estrattore BL-6060
Fresa irrigazione esterna Ø 3 ND-1726E
Chiave inserimento impianto ND a cricchetto ND-E7001
Chiave inserimento impianto ND a contrangolo ND-E9040

CODICI PRODOTTO:

Sur.Kit.01: kit chirurgico deluxe per la linea
BL e GL
BL-Sur.Kit.01: kit chirurgico deluxe per la
linea BL



COMPONENTI PER KIT CHIRURGICO

SEMPLIFICATORI CHIRURGICI

PERNI DI PARALLELISMO



CT-9000
1.6 mm
2.0mm



CT-E9007
3.5mm
ø est.



CT-E9008
4.3mm
ø est.



CT-E9010
5.1mm
ø est.



CT-2000
Allungatore Chirurgico

CHIAVE PROTESICA



CT-9025S
Chiave esagonale



CT-9025
Chiave esagonale



CT-9019
Manipolo



CT-9024S
Chiave esagonale
girevole



CT-9024
Chiave esagonale
girevole



CT-8051
Chiave per vite
protesica a
cricchetto corta



CT-8052
chiave per vite
protesica a
cricchetto lunga

STOP DI PROFONDITÀ PER FRESA



CT-STOP06
Stop L.6



CT-STOP02
Stop L.7



CT-STOP01
Stop L.8



CT-STOP07
Stop L.9



CT-STOP03
Stop L.10



CT-STOP08
Stop L.11



CT-STOP12
Stop L.12



CT-STOP09
Stop L.13



CT-STOP14
Stop L.14



CT-STOP10
Stop L.15

CHIAVI PER IMPIANTI BL



BL-E7001
Chiave inserimento im-
pianti a cricchetto corta



BL-E7001L
Chiave inserimento im-
pianti a cricchetto lunga



BL-E9040
Chiave inserimento
impianti a contangolo

CHIAVE DINAMOMETRICA 50NCM



CT-8010

FRESE E MASCHIATORI



PROCEDURA CHIRURGICA IMPIANTI Ø 3.5 BL



CT-2020
Fresa lanceolata



CT-1720E
Fresa di profondità 2.0
(ø esterno 2.0 mm)



CT-1735E
fresa di allargamento 3.5
(ø esterno 3.5 mm)



EL-1735N
Fresa EL Ø 3.5
(per l'utilizzo in osso compatto)




PROCEDURA CHIRURGICA IMPIANTI Ø 4.3 BL



CT-2020
Fresa lanceolata



CT-1720E
Fresa di profondità 2.0
(ø esterno 2.0 mm)

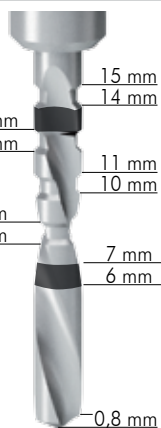

CT-1735E
fresa di allargamento
3.5 (ø esterno
3.5 mm)



CT-1743E
Fresa di allargamento
4.3 (ø esterno
3.6 mm)



EL-1743N
Fresa EL Ø 4.3
(per l'utilizzo in osso
compatto)



PROCEDURA CHIRURGICA IMPIANTI Ø 5.1 BL



CT-2020
Fresa lanceolata



CT-1720E
Fresa di profondità 2.0
(ø esterno 2.0 mm)



CT-1735E
fresa di allargamento
3.5 (ø esterno
3.5 mm)



CT-1743E
Fresa di allargamento
4.3 (ø esterno
3.6 mm)



CT-1751E
Fresa di allargamento
5.1 (ø esterno 4.6
mm)



EL-1751N
Fresa EL Ø 5.1
(per l'utilizzo in osso
compatto)



Via Santa Margherita al Colle n. 18 - 40136, Bologna - ITALY
Tel. +39 051 6661817 - Fax +39 051 6667071
www.c-tech-implant.com - info@c-tech-implant.com